


Návod na použití nádob řady MINOR a MEDIUS

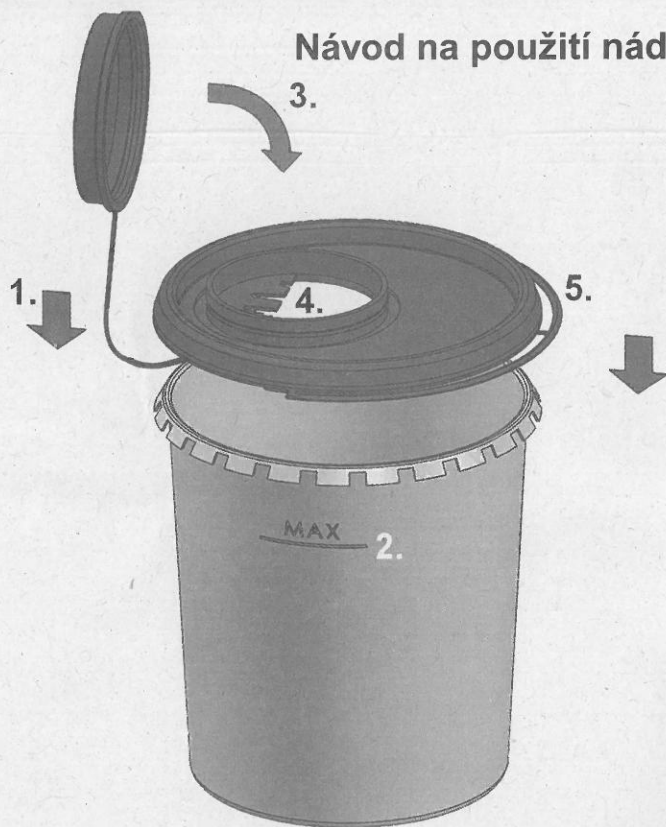

1. Před použitím sběrné nádoby nasadte víko na nádobu a tlakem zaklapněte víko přes lamely nádoby po celém obvodu.
2. Maximální přípustné plnění je do 85 % objemu nádoby – viz čárový ukazatel naplnění MAX nebo FULL na nádobě. Použité ostré předměty se volně vkládají nebo vhadzují do nádoby! Nesmí dojít ze strany uživatele k použití síly, aby tyto předměty do nádoby vložil!
3. Po naplnění nádoby tlakem zaklapněte víčko, které má dvě polohy a tyto pohotovostní a pro konečné – trvalé uzavření. Vložené nebo vhozené ostré předměty nesmí vyčnívat z nádoby! Tlakem víčka na tyto vyčnívající použité ostré předměty může dojít k propíchnutí vlastní nádoby!
4. Zářezy na víčku slouží k možnému sejmutí použitých injekčních jehel a dalších ostrých předmětů.
5. Po naplnění a konečném – trvalém uzavření nádoby, slouží ke zvedání nebo manipulaci s nádobou rukojeť, které je pevně spojena s nádobou.

Přípustná plnicí hmotnost				
0,5L - 0,15 kg	0,8L - 0,25 kg	1L - 0,30 kg	1,5L - 0,45 kg	2L - 0,60 kg
				2,5L - 0,75 kg

Nádoby mohou být plněny odpadem, jehož součástí jsou zbytky tekutin. Pokud obsah tekutin překročí 1 % objemu plnění, musí být k odpadu přidán absorbující materiál. Před likvidací ponechat nádobu v plnicí poloze. Nesmí dojít k mechanickému poškození nebo deformaci nádoby nevhodnou manipulací. Nádoba není opakovatelně použitelná.